


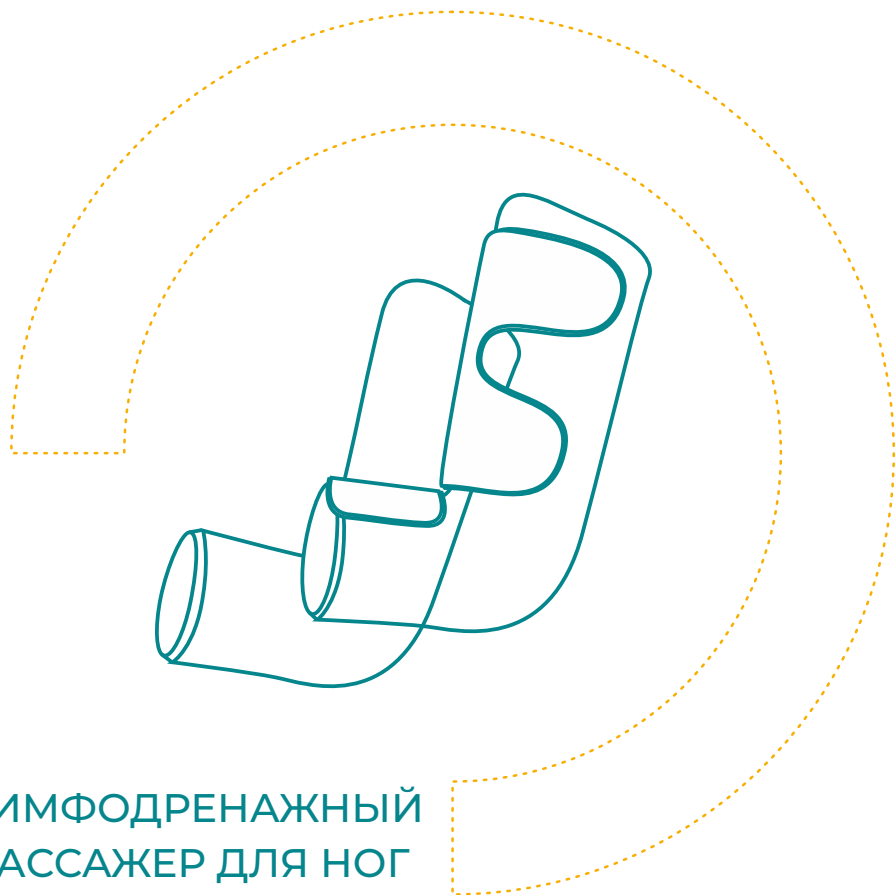

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

Air Pro

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор лимфодренажного массажера для ног **Bodo Air Pro**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед применением массажера, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте все требования техники безопасности, чтобы убедиться в правильности эксплуатации изделия.

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера в следующих случаях:

- ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов и повышенным кровяным давлением
- ✓ страдаете диабетом
- ✓ страдаете мышечной гипотонией
- ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
- ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
- ✓ при онкологии и большинстве видов доброкачественных опухолей
- ✓ страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
- ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
- ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
- ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела

Запрещено использовать массажер:

- ✓ в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления седативных средств, вызывающих сонливость, подавленное состояние, повышающих или понижающих кровяное давление
- ✓ если установлены кардиостимуляторы или другие подобные медицинские устройства для поддержания жизни человека
- ✓ при туберкулезе, флебите, тромбозе, отеке легких, ревматизме, тендините, дисфункции суставов, эпилептикам, а также людям с нарушением свертываемости крови и аллергией
- ✓ в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), высокой температурой, в сильно запыленных местах и местах с высоким электромагнитным излучением

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ если он поврежден, произошел механический или электронный сбой — в таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу

Запрещено:

- ✓ самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство массажера
- ✓ пользоваться массажером на улице, в местах с плохой вентиляцией, под одеялом, подушкой или покрывалом во избежание перегрева
- ✓ пользоваться массажером на влажное тело
- ✓ стоять и прыгать на массажере, бросать, оказывать на него чрезмерные нагрузки
- ✓ использовать медицинские или косметические кремы и лосьоны во время массажа
- ✓ использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажером
- ✓ использовать другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажером
- ✓ засыпать и спать с массажером
- ✓ пользоваться неисправными или поврежденными шнуром питания, вилок или розеткой
- ✓ извлекать шнур питания из розетки во время сеанса массажа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Массажер не предназначен для медицинского, коммерческого и общественного использования.

Массажер предназначен только для взрослых. Использование массажера лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.

Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с врачом.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание дискомфорта, не используйте массажер сразу после еды.

Избегайте попадания волос и одежды в пространство между воздушно-компрессионными подушками массажера во время его работы.

Используйте адаптеры питания только из комплекта поставки.

Не перемещайте массажер при помощи шнура питания или используя его как ручку.

Если массажер не используется, выключите его и извлеките вилку адаптера питания из розетки.

Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

Если из массажера слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.

Рекомендуемое время использования массажера — 15 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность.

ОПИСАНИЕ


Лимфодренажный
массажер




Пульт
управления




Адаптер питания
и батарейки

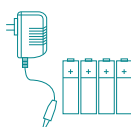

Сумка для
хранения

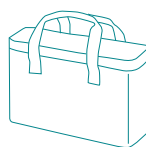


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

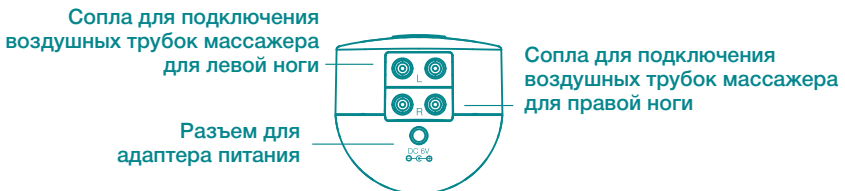


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Снимите крышку батарейного отсека сзади пульта управления и, соблюдая полярность, установите 4 батарейки по 1.5В типа AA (LR6), или подсоедините штекер адаптера питания к разъему питания пульта управления. Вставьте вилку адаптера питания в розетку.

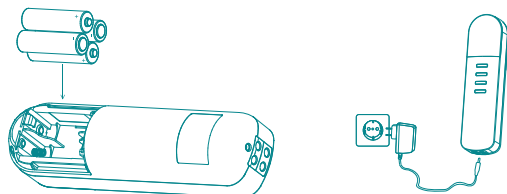

Массажер используется на голые ноги, каждую ногу поместите в соответствующую промаркированную деталь массажера для левой (L) и правой (R) ноги, плотно зафиксируйте ногу специальными застегками.

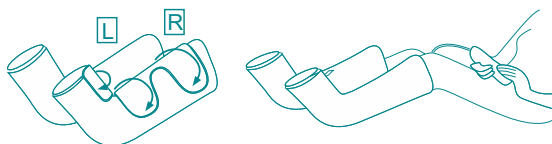

Подсоедините воздушные трубки массажеров к соответствующим соплам пульта управления (сопла промаркированы, L – для левой и R – для правой ноги). Убедитесь, что воздушные трубки не скручены между собой и не пережаты.

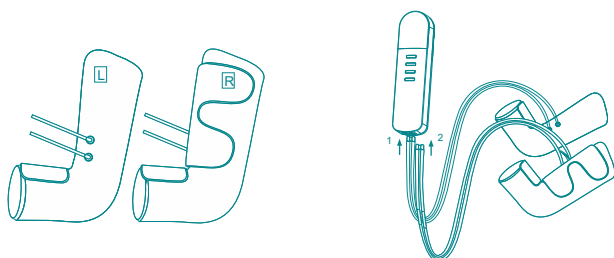

Во время сеанса массажа рекомендуется держать ноги в горизонтальном положении или слегка приподнятыми для равномерного кровообращения.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимание:

- ✓ запрещено использовать в качестве источника питания литий ионные и прочие аккумуляторы, разрешены только щелочные (алкалиновые) не перезаряжаемые батарейки типа AA (LR6)
- ✓ запрещено использовать батарейки совместно с адаптером питания
- ✓ полностью заряженные батарейки можно использовать в течение приблизительно 5-7 дней (по 15 минут каждый день) до их полной разрядки
- ✓ при критически низком уровне заряда батареек начнет мигать световой индикатор «Время», массажер при этом принудительно будет выключен

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После использования извлеките вилку адаптера питания из розетки.

Если в качестве источника питания установлены батарейки и применение массажера не предполагается в течение длительного времени – извлеките их из пульта управления.

Отсоедините воздушные трубки, чтобы выпустить весь воздух из массажера и пульта управления. Для полного выхода воздуха требуется около 1 минуты.

Снимите массажеры с ног и аккуратно сложите все детали и комплектующие в сумку для хранения.

УПРАВЛЕНИЕ

Кнопка «Вкл/Выкл»

Нажмите кнопку, чтобы включить массажер, загорится экран дисплея и по умолчанию запустится 1-й автоматический режим массажа со средним уровнем силы и длительностью 10 минут.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить массажер.

Кнопка «Режим»

Коротко нажимайте кнопку для переключения между тремя автоматическими режимами работы массажера, имеющих следующие настройки:

- ✓ *Режим 1*: быстрый массаж
- ✓ *Режим 2*: медленный массаж
- ✓ *Режим 3*: переменный массаж (попеременно чередуется воздушно-компрессионный массаж в левом и правом массажере, а также ступнях и голеньях)

Кнопка «Сила»

Коротко нажимайте кнопку для переключения между тремя уровнями силы массажа.

Кнопка «Время»

Нажмите кнопку и задайте длительность сеанса массажа (5, 10 или 15 минут). При выполнении сеанса массажа индикатор оставшегося времени будет уменьшаться с градацией в 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ✓ переключаясь между автоматическими режимами, массажер в течение 6 секунд может выпускать воздух перед тем, как начать новый сеанс массажа
- ✓ компрессионное давление в ступнях и голеньях может отличаться, это зависит от выбранного автоматического режима
- ✓ по завершении времени сеанса массажа массажер автоматически выключится

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой массажера убедитесь, что он выключен, отсутствуют батарейки питания в пульте управления, а вилка адаптера питания отсоединена от розетки.

Для чистки используйте мягкую ткань, смочите ее в воде, хорошо отожмите и аккуратно протрите поверхность массажера и воздушные трубки. Дайте массажеру высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.

Пульт управления, провода, адаптер питания чистите только сухой хлопчатобумажной тканью.

Внимание! При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажера и повредить его. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

Рекомендуется хранить массажер в оригинальной упаковке, в недоступном для детей, в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Перед каждым использованием массажера, убедитесь, что отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки), не нагревается шнур питания, отсутствуют другие нетипичные признаки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажера. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или возникли проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Массажер не работает	Вилка адаптера питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура адаптера питания в розетку, проверьте все соединения
	Штекер шнура адаптера питания не подсоединен к разъему питания пульта управления	
	Не установлены батарейки, либо установлены без соблюдения полярности или батарейки разряжены	Установите батарейки, соблюдая полярность, или замените их на полностью заряженные
	Закончилось время сеанса массажа	Включите массажер и запустите новый сеанс массажа
Массажер очень горячий	Слишком долгая непрерывная работа массажера	Выключите питание и дайте массажеру остыть не менее 30 минут перед следующим использованием
Воздушные подушки не надуваются	Не подсоединены воздушные трубки к соплам	Подсоедините воздушные трубки к соплам
	Воздушные трубки скручены или пережаты	Освободите воздушные трубки от деформаций

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: лимфодренажный массажер для ног

Модель: Air Pro

Напряжение: AC100-240V/50-60Hz

Мощность: 6W

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажера «Bodo» дилером в течение 1 года со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком представляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ материала массажера.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажер на новый, адекватный по стоимости неисправного массажера на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажера производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки массажера в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажера.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 6 месяцев

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Телефон: _____

ФИО клиента: _____

Адрес продавца: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)