

МАССАЖНОЕ
КРЕСЛО

Space

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Space**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	8
ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	9
СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА	10
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	12
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	13
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	14
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	14
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	24
УХОД И ХРАНЕНИЕ	25
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	26
СПЕЦИФИКАЦИЯ	26
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	27

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла.



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
 - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
 - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
 - ✓ страдаете ожирением, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным кровяным давлением
 - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
 - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
 - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
 - ✓ при онкологии
 - ✓ при парестезии
 - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
 - ✓ при тендовагините и остеопорозе
 - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
 - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
 - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
 - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
 - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Использование массажного кресла людям преклонного возраста, лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем лица, ответственного за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Убедитесь в исправности электрической сети и розетки, что их мощность достаточна для работы массажного кресла. Неправильный выбор электропитания может привести к нагреву электрического кабеля, розетки или даже к возгоранию. Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или при употреблении седативных средств, вызывающих сонливость, подавленное состояние, повышающих или понижающих кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Помещать колени в механизм для массажа голеней.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а так же класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Создавать препятствия и блокировать движения массажных механизмов и массажного блока для ног.
- Перемещать работающее кресло. Вставать на кресло во время массажа.
- Включать и использовать массажное кресло, только что принесенное с холода в теплое помещение. Подождите не менее 1 часа, чтобы кресло прогрелось до температуры теплого помещения
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Выключать питание и извлекать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажным креслом.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.
- Производить замену предохранителя не выключив электропитание и не отсоединив вилку питания от розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности


- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 120 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла – 20 минут в день. Начинать всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5-ти минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания конечностей между массажными роликами и попадания рук или ног в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Слушайте музыку через динамики Bluetooth на уровне, не превышающем 60% от максимальной громкости устройства, и не более 60 минут подряд.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- При отсутствии стабильного напряжения в электросети, необходимо установить стабилизатор напряжения.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом в дождливую погоду, при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
- **Условия хранения:** в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.
- Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА


Массажное кресло — это механическое устройство бытового назначения для использования дома или в офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа. Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движения различными способами и осуществляющие контакт с телом человека путем массирования участков тела.

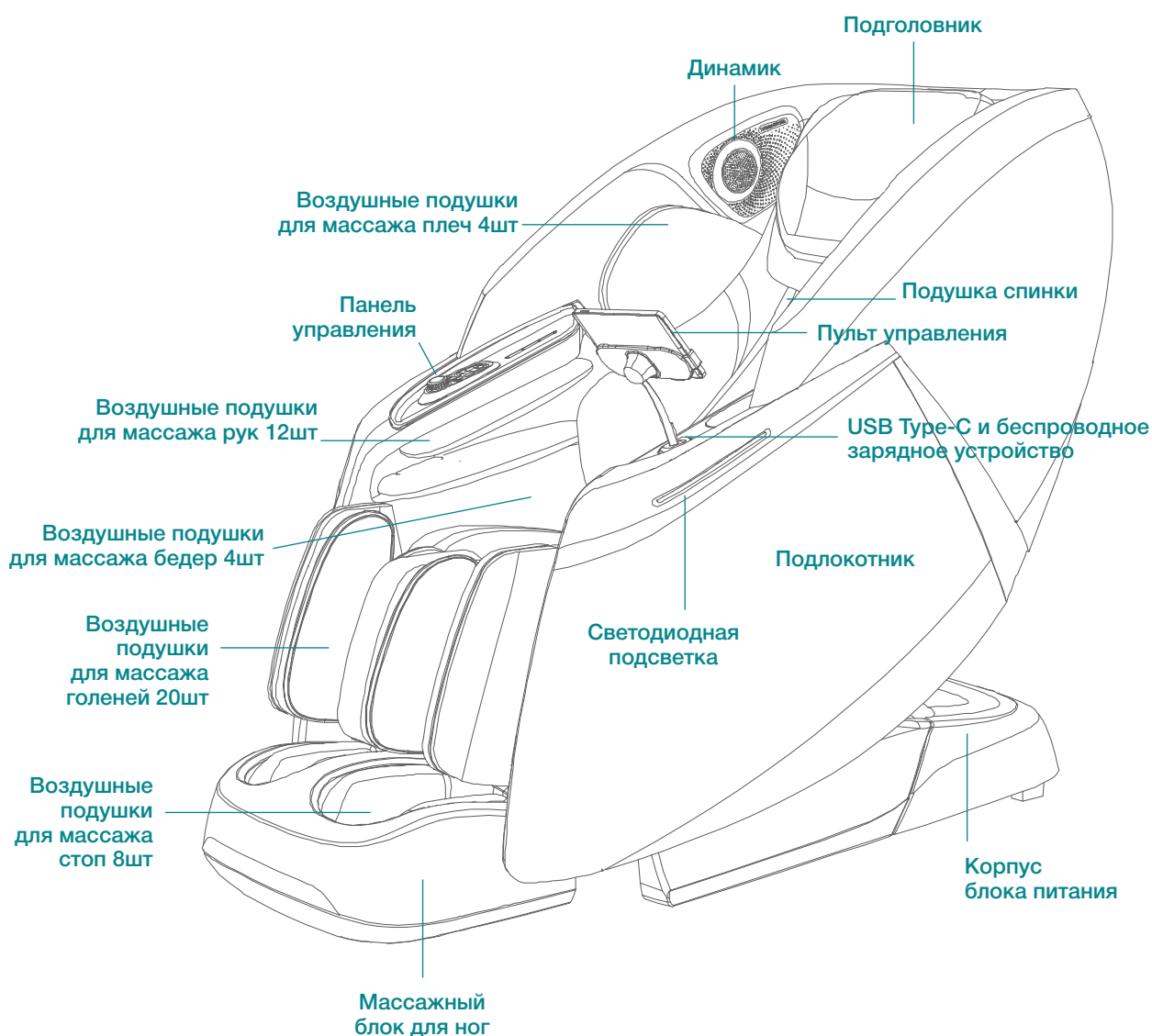

СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА


Шаг 1

При помощи 2-х или более человек достаньте корпус массажного кресла, массажный блок для ног и остальные комплектующие. Кресло комплектуется набором для сборки. Доставать все необходимо медленно и осторожно!

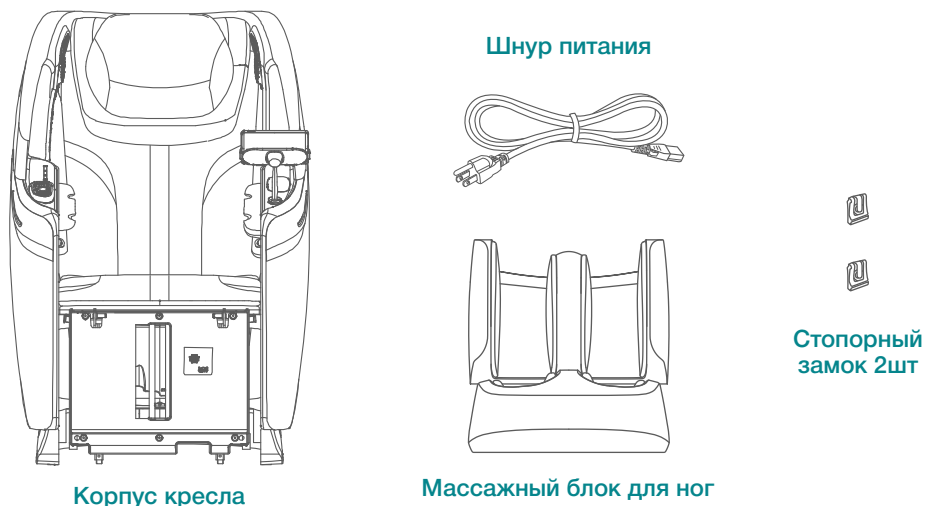


Шаг 2

Возьмите обеими руками массажный блок для ног и приставьте к корпусу массажного кресла. Плотно вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем корпуса кресла, а воздушную трубку в сопло. Проверьте качество соединений. Убедитесь, что воздушная трубка и провод не скручены между собой и не пережаты.

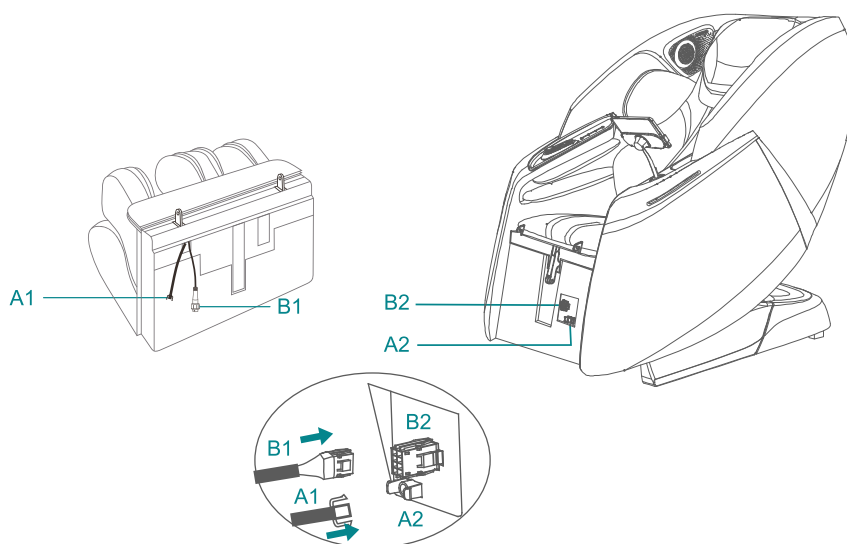


Шаг 3

Подсоедините массажный блок для ног к корпусу массажного кресла, совместив оси с кронштейнами крепления. После того, как массажный блок для ног будет надежно закреплен, установите с левой и правой сторон стопорный замок, фиксирующий соединения оси и кронштейна, как показано на схеме.

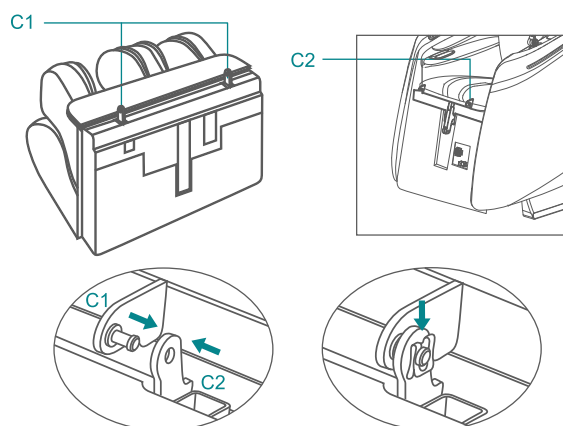


Шаг 4

Соедините подушку сиденья с манжетой массажного блока для ног с помощью молнии.

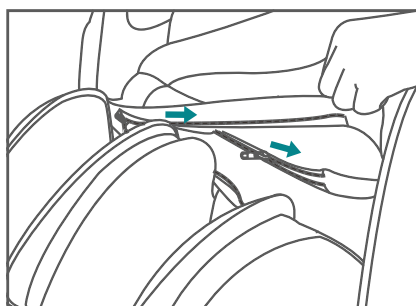

Шаг 5

Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

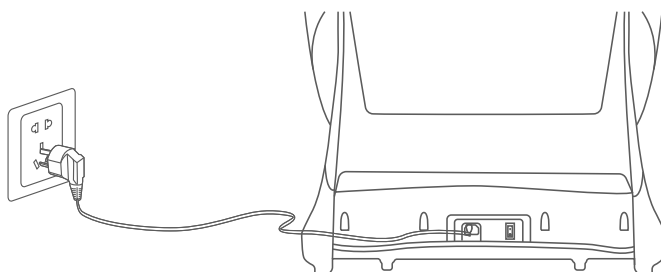

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА


Массажное кресло оборудовано колесиками в основании для перемещения. Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.



Для перемещения кресла вам необходимо сначала его наклонить и поставить на колесики при помощи двух или более человек.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

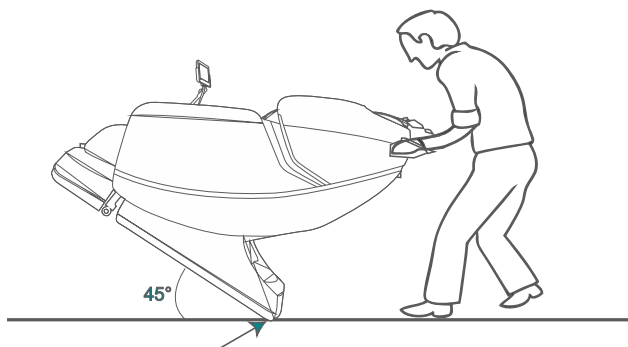


ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Не прилагайте чрезмерное усилие при наклоне - это может привести к опрокидыванию и повреждению кресла.
- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку сзади.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений шнура электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением кресла к электросети.

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 18 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 60 см впереди кресла). Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

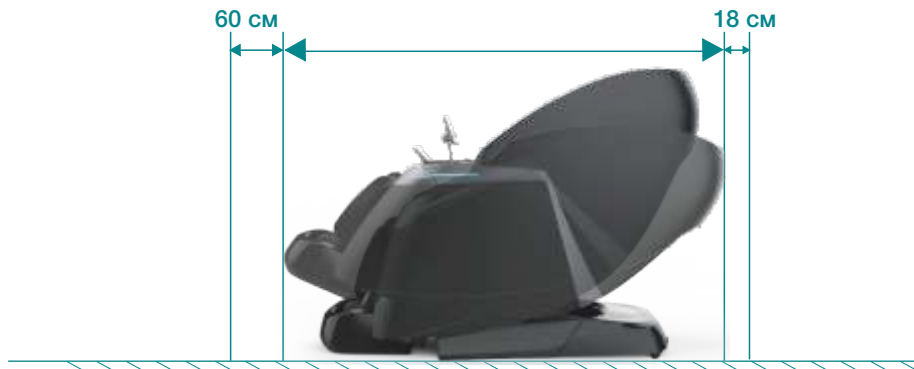


Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

Тщательно проверьте массажное кресло на предмет отсутствия повреждений, разрывов тканей подушки спинки, подголовника, сиденья и пр. При наличии разрывов или других повреждений, какими бы незначительными они не казались, немедленно прекратите использование массажного кресла и обратитесь в сервисную службу.


Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, выберите необходимую программу массажа и ее длительность.

ВНИМАНИЕ!

- Избегайте попадания конечностей и прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло и его массажные ролики находятся в исходном положении (*верхние ролики механизма расположены в верхней части спинки, а нижние — в районе поясницы, как показано на рисунке*), в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения.
- После использования выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.
- При использовании массажного кресла не кладите руку на беспроводное зарядное устройство. Минимальное расстояние между рукой и беспроводным зарядным устройством должно быть 8 см.

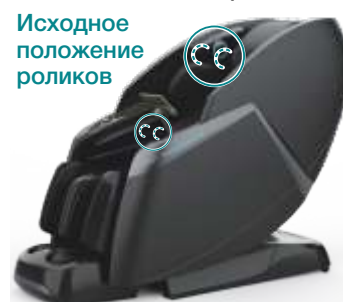

Сенсорный пульт управления позволяет выбрать автоматические программы, программы массажа ручного режима, регулировать интенсивность 4D-массажа, воздушно-компрессионного массажа, включать функцию прогрева, Bluetooth, менять другие настройки массажа и массажного кресла.

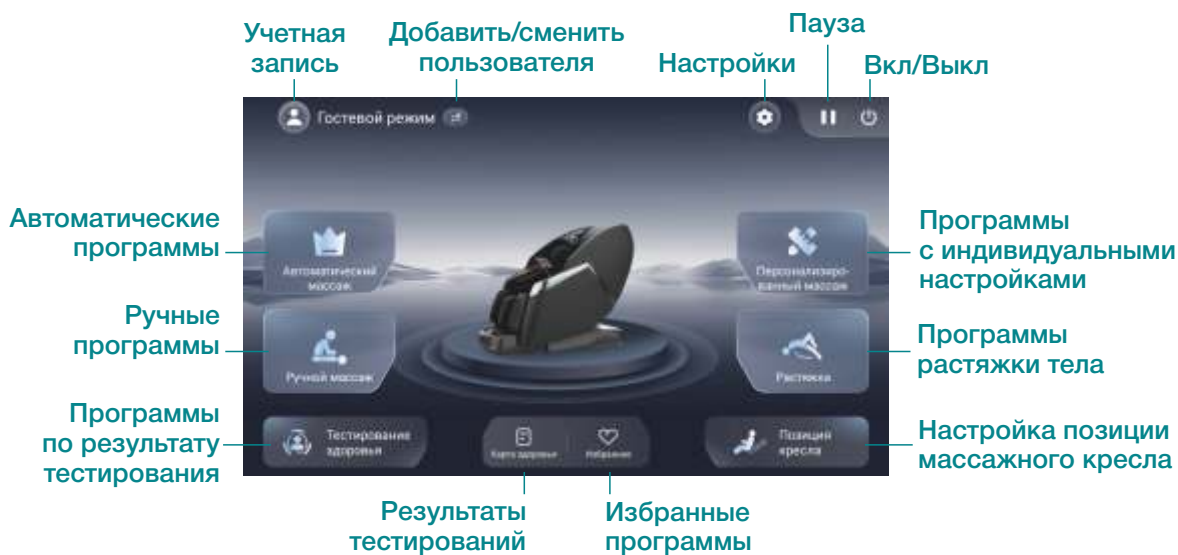

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Учетная запись пользователя

Для более удобного и комфортного использования кресла рекомендуется сначала создать учетную запись и войти в нее - это быстрый доступ к настройкам и отслеживание изменений в будущем. Каждый пользователь может создать собственную учетную запись со своими данными.

Примечание: при первичном использовании массажного кресла и пульта управления, перед регистрацией учетной записи - подключитесь к сети интернет, зайдя в раздел «Настройки».



Регистрация и авторизация нового пользователя



Зарегистрируйтесь и получите доступ к персональным настройкам и избранным массажам (введите ваш адрес электронной почты, далее, код подтверждения (отправим его на ваш электронный адрес), затем задайте пароль).

Обязательно ознакомьтесь и примите Пользовательское и Лицензионное соглашения.

Если вы зарегистрированы - можете сразу входить в систему.

Если вы забыли пароль, нажмите «Забыли пароль?», чтобы сбросить его.


Примечание: можно использовать «Гостевой режим» без входа в систему, но данный режим не позволит сохранять личную информацию, настройки программ или данные тестирования здоровья.

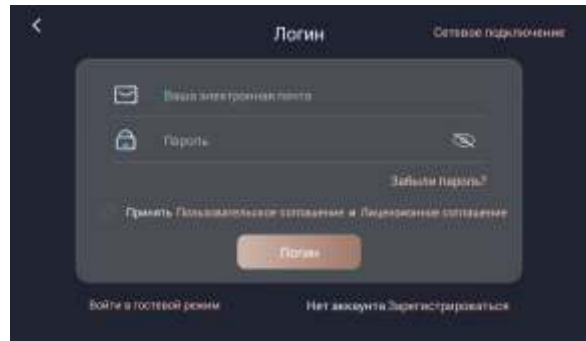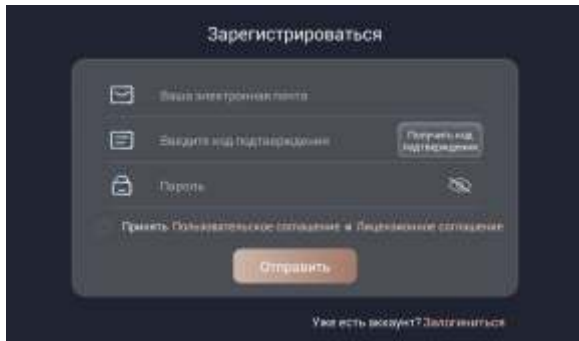

Данные пользователя



Заполните личные данные, чтобы массажное кресло могло адаптировать массаж к вашему телосложению.

Выберите фото профиля, введите имя пользователя, укажите пол и остальные данные (дату рождения, рост, вес).

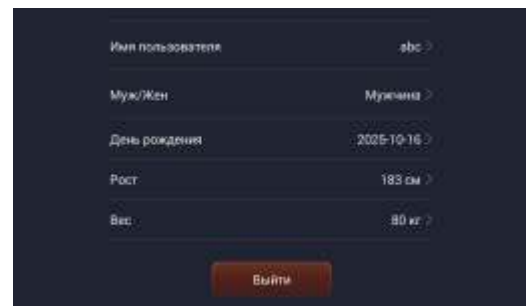


Сканирование тела

Внимание: перед сеансом массажа обязательно снимите все украшения и освободите карманы одежды от любых предметов. Сядьте удобно и максимально откиньтесь назад.

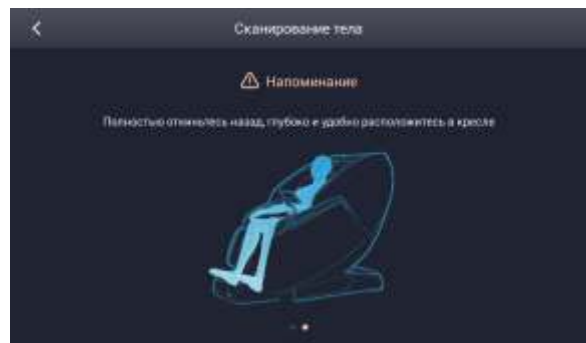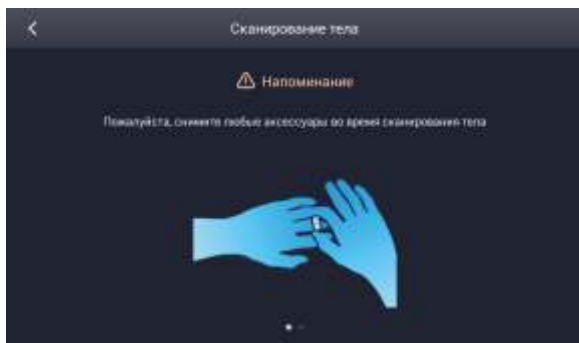

Перед каждым сеансом массажа кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения позиции плеч - следуйте инструкциям на экране и дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, вы можете в течение 10 секунд самостоятельно изменить и настроить их позицию с помощью кнопок со стрелками «Ручная настройка». После регулировки и истечении 10 секунд начнется массаж.

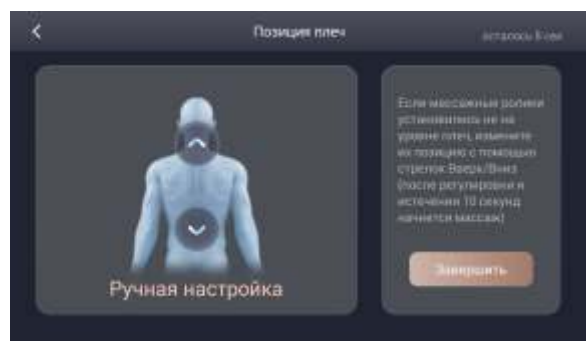


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

В массажном кресле 20 автоматических программ массажа в 5 категориях, в каждой категории 4 специальные программы с разнообразными видами массажа, адаптированными к различным потребностям.

Экран настроек автоматических программ массажа

Выберите необходимую автоматическую программу массажа, а для еще большего расслабления - измените ее настройки и дополните функциями: *роликовый массаж стоп, прогрев, разминание голеней или подсветка.*

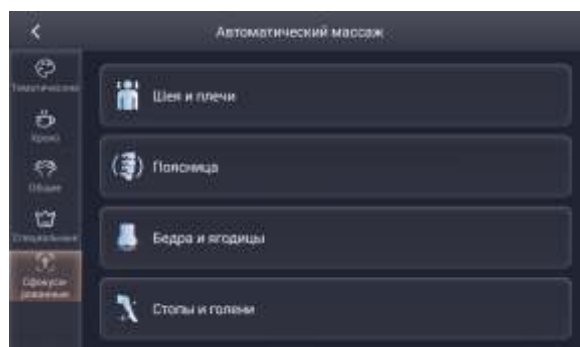

1 – сохранить настройки для персонализированного массажа
2 - нажмите, чтобы увидеть где движутся массажные ролики спины

3 – таймер сеанса массажа
4 – параметры верхнего механизма

5 – сохранить программу в избранное

6 – пауза

7 – Вкл/Выкл

8 - параметры нижнего механизма

9 – сила 4D массажа (доступно 5 уровней настройки)

10 – скорость разминания (доступно 5 уровней настройки)

11 – сила аэромассажа (доступно 5 уровней настройки)

12 – скорость постукивания (доступно 5 уровней настройки)


13 – громкость Bluetooth-динамиков

14 – светодиодная подсветка

15 – разминающий массаж голеней

16 – роликовый массаж стоп

17 – прогрев массажными роликами, прогрев поясницы и голеней

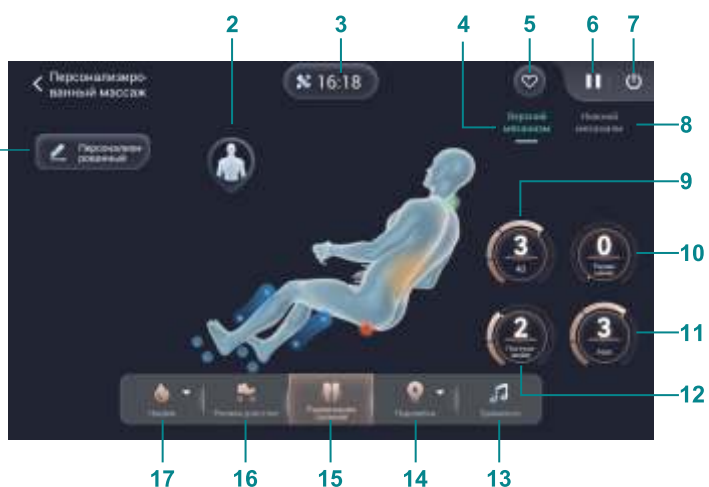



Утренний

Массаж с разнообразными техниками для снятия утренней скованности, улучшения кровообращения и повышения настроения — начните новую жизнь!



Полуденный

Режим для использования в середине дня: снимает усталость и напряжение, способствует восстановлению сил.



Вечерний

Специальная программа массажа для подготовки тела и ума ко сну: вызывает глубокое расслабление, успокаивает тело и разум, улучшает качество сна.



Расслабляющий

Снятие физической усталости, расслабление мышц, уменьшение болезненности и восстановление жизненных сил.



Успокаивающий

Мягкие техники, создающие спокойную, свободную от стресса атмосферу и успокаивающие нервную систему.



Восстанавливающий

Разминает и восстанавливает мышцы после нагрузок, улучшая общую гибкость и оздоравливая и омолаживая организм в целом.



Бережный

Программа сочетает массажные техники, обеспечивающие расслабление и терапевтический эффект.



Релакс

Режим с мягкими поглаживаниями и надавливаниями для снятия мышечного напряжения и снятия стресса.



Для него

Эксклюзивная мужская программа массажа: глубоко расслабляет, снимает мышечное напряжение и поддерживает физическое самочувствие — почувствуйте разницу уже после первых сеансов!



Для нее

Эксклюзивная программа массажа для женщин: учитывает уникальные потребности в деликатности, фокус внимания на здоровье, релаксацию, снятие напряжения и уменьшение стресса — ваш путь к гармонии!



Глубокий

Массаж с интенсивной настройкой давления для глубоких мышц — эффективное снятие хронической боли и долгожданное расслабление.





Растяжка

Набор упражнений в духе тайского массажа: сочетание растяжек и сжатий для эластичности мышц и свободы движений в суставах.



Шея и плечи

Специализированная программа для шеи и плеч: снимает напряжение, уменьшает боль и восстанавливает комфорт.

-  **Поясница**
Эксклюзивная программа для поясницы: снимает боль в нижней части спины, расслабляет мышцы и улучшает гибкость позвоночника.
-  **Бедра и ягодицы**
Программа массажа способствует снижению мышечной усталости, улучшает кровообращение и повышает гибкость поясницы и бедер.
-  **Стопы и голени**
Целенаправленное снятие боли, активизация кровотока и комфорт в ногах.
-  **Быстрый**
За короткое время вы прочувствуете полный потенциал кресла — плавность движений, точность техник и ощущение безупречного комфорта.
-  **Интеллектуальный**
Анализ тела в реальном времени и персонализированный массаж с подбором техник.
-  **Бодрящий**
Массаж активизирует кровообращение, снимает усталость и повышает физическую работоспособность.
-  **Деликатный**
«Мягкое прикосновение»: легкие техники, минимальное давление, тихое расслабление и комфорт.

ПРОГРАММЫ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА

В дополнение к автоматическим программам мы предлагаем вам самим бесконечно варьировать программы для двух массажных механизмов: множество техник, персональные настройки — для идеального массажа и повышенного удовольствия.

Примечание: экран настроек программ массажа ручного режима идентичен экрану настроек автоматических программ.



ТЕСТИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Кресло оснащено функцией ИИ-тестирования состояния здоровья, в процессе выполнения которого на экране дисплея отображаются:

- общий показатель индекса здоровья
- уровень кислорода в крови (*сатурация*)
- частота сердечного ритма (*пульс*)
- данные о микроциркуляции
- вариабельность сердечного ритма (*HRV*)

Для подготовки к тестированию сядьте в кресло поудобнее и поместите левую руку на устройство диагностики (*пульсоксиметр*). Следуйте указаниям на экране пульта управления. Глубокое и ровное дыхание позволит расслабиться и добиться наиболее корректных результатов теста.

По результатам тестирования вам будет предложен эксклюзивный сеанс массажа.

Внимание: отображаемые результаты тестирования носят информационный характер и не являются официальными результатами медицинских тестов и исследований.



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ МАССАЖ

В массажном кресле возможно настроить и сохранить в «Избранное» свою индивидуальную программу массажа в соответствии с вашими пожеланиями.


Следуя подсказкам на экране, выберите те зоны тела, которые хотите проработать, а также техники массажа верхнего и нижнего механизмов. Нажмите «Далее», чтобы перейти к следующему экрану и выберите дополнительные опции массажа и параметры светодиодной подсветки. Нажмите «Завершить», запустится созданный вами сеанс персональной программы массажа.



ПРОГРАММЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ТЕЛА (РАСТЯЖКА)

Для максимального комфорта и наслаждения от терапии программы вытяжения в массажном кресле разработаны с возможностью выбирать зону воздействия: от локальной растяжки до растяжения всего тела.

Внимание: во время программы «Растяжка» невозможно отрегулировать позицию массажного кресла.

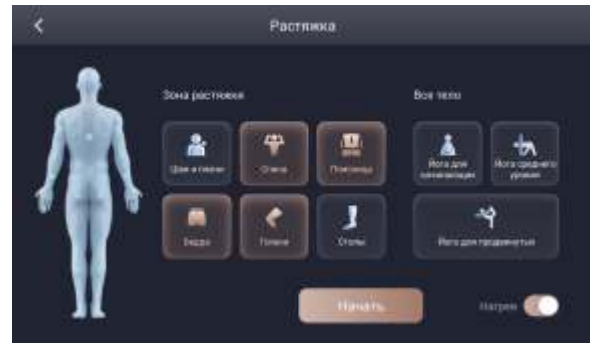

ЭКРАН НАСТРОЕК ПОЗИЦИИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Примечание: «нулевая гравитация» – это особый режим работы массажного кресла, при котором тело принимает максимально комфортное положение для расслабления (голова и ноги находятся практически на одном уровне под определенным углом – в таком положении нагрузка равномерно распределяется по всему телу, и оно максимально расслаблено), при этом усиливается массажный эффект.



Возврат кресла в исходное вертикальное положение

Поднять/Опустить спинку кресла

4 позиции «нулевой гравитации»


Точная настройка позиции «нулевой гравитации»

Поднять/Опустить массажный блок для ног

Удлинить/Укоротить массажный блок для ног


КАРТА ЗДОРОВЬЯ

Войдите в меню, чтобы посмотреть данные результатов тестирования здоровья.

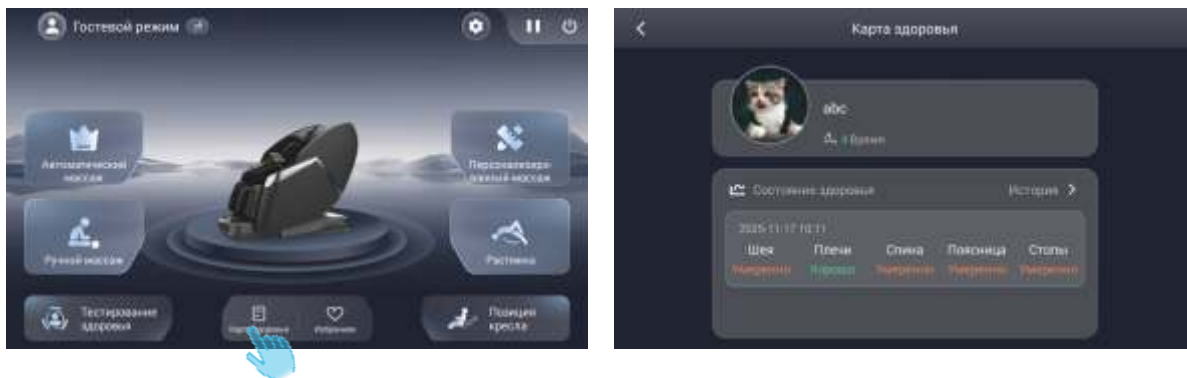


ИЗБРАННОЕ

Сохраняйте ваши любимые программы массажа в Избранное. Для быстрого доступа к программам, зайдите в меню и запустите любимую программу. Длительное нажатие на ячейку удалит программу из Избранного.

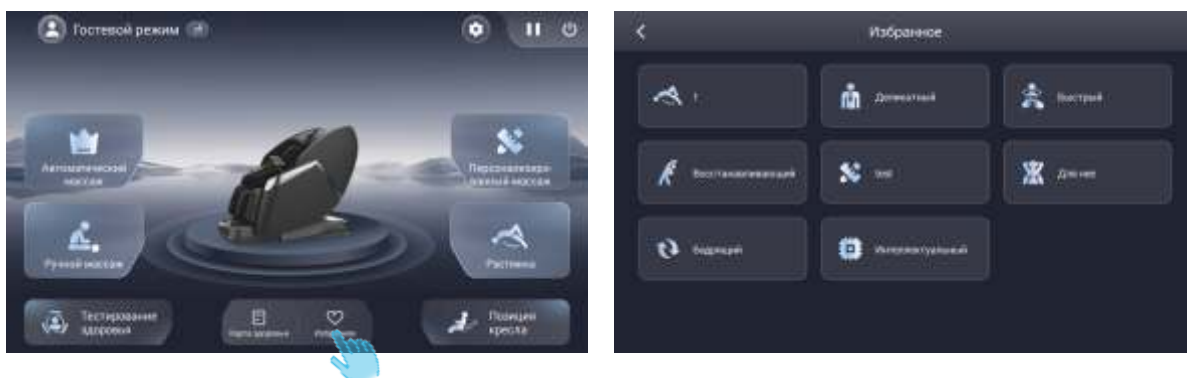


НАСТРОЙКИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Нажмите на иконку шестеренки на главном экране, чтобы изменить настройки массажного кресла.

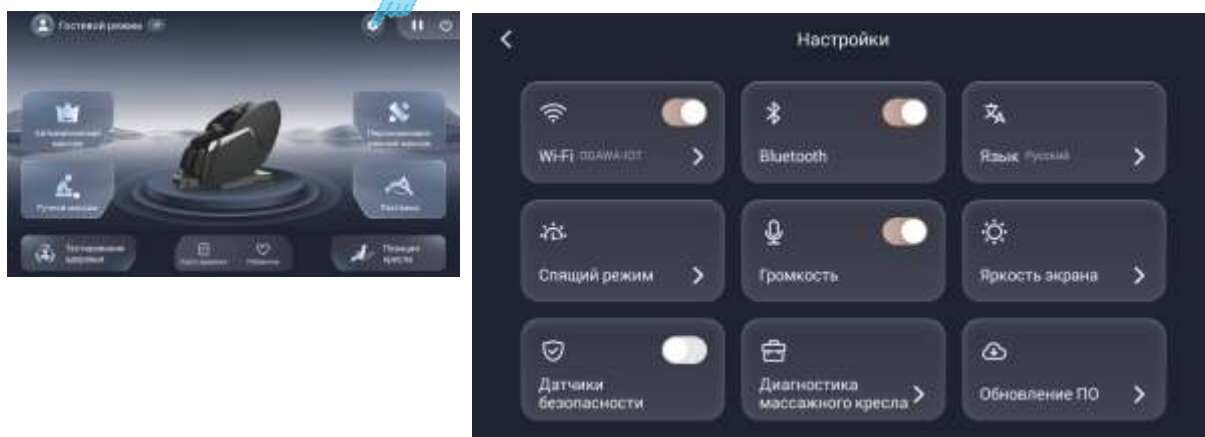




ДАТЧИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Кресло оснащено датчиками безопасности. При обнаружении постороннего предмета в области массажного блока для ног или спинки кресла - на экране пульта управления появится предупреждающее сообщение, необходимо устранить препятствия и нажать ОК для продолжения.

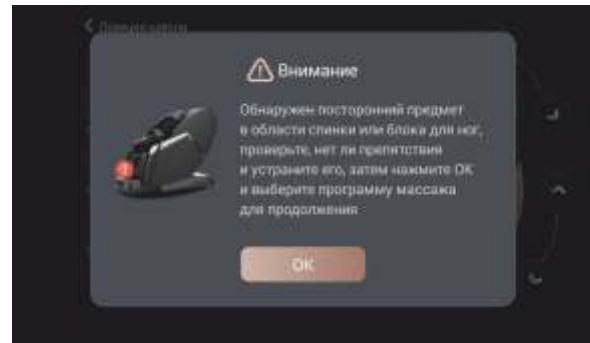

ДИАГНОСТИКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА


Массажное кресло оснащено функцией самодиагностики. Встаньте из кресла и нажмите «Запустить», чтобы начать диагностику. Вы сможете проверить, все ли функции кресла работают в штатном режиме.

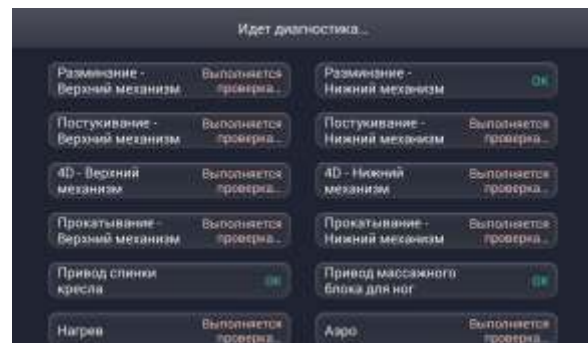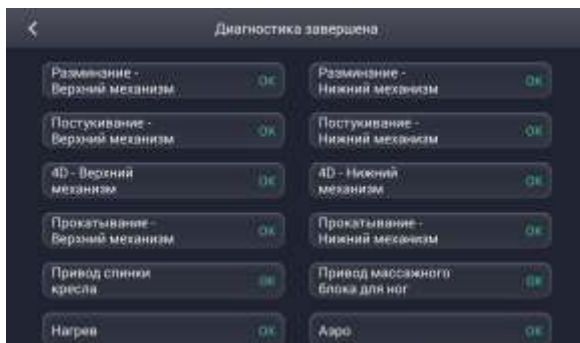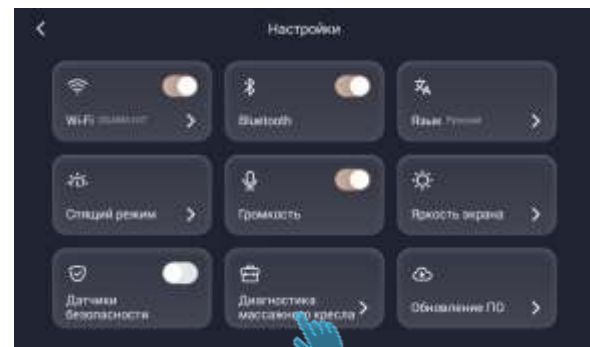

АУДИОСИСТЕМА

Успешное Bluetooth сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции Bluetooth в этих устройствах и под управлением операционной системы Android или iOS. После сканирования доступных Bluetooth устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом. После успешного сопряжения вы сможете слушать свою любимую музыку во время массажа через динамики кресла.

Примечание: динамики будут работать только тогда, когда массажное кресло используется. После завершения сеанса массажа рекомендуется разорвать соединение Bluetooth, чтобы другой пользователь мог подключиться к массажному креслу.

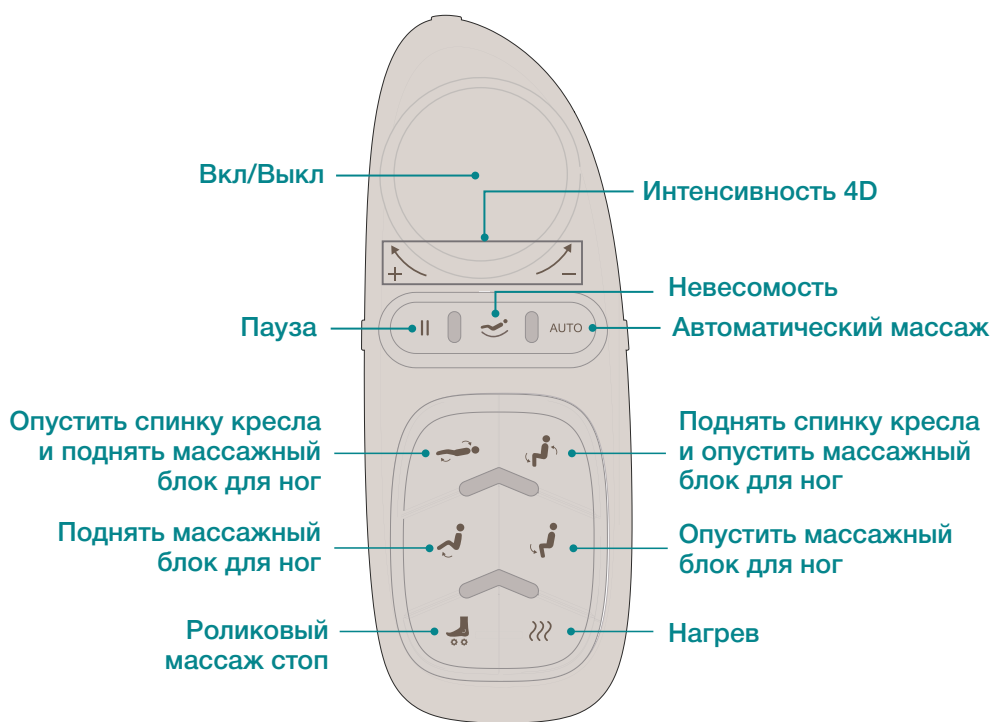

Кнопка «Вкл/Выкл» — включает и выключает все функции массажного кресла.

Кнопки «Интенсивность 4D» – уменьшают «←» или увеличивают «→» интенсивность 4D-массажа верхнего или нижнего механизмов.

Кнопка «Пауза» – приостанавливает таймер и все функции массажа, при повторном нажатии сеанс массажа продолжится.

Кнопка «Невесомость» — запускает или отключает функцию раскладки кресла в позицию «нулевой гравитации».

Кнопка «Авто» — запускает или останавливает автоматическую программу массажа.

Кнопка «Поднять спинку кресла и опустить массажный блок для ног» – нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы одновременно поднять спинку кресла и опустить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить их движение.

Кнопка «Опустить спинку кресла и поднять массажный блок для ног» – нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы одновременно опустить спинку кресла и поднять массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить их движение.

Кнопка «Поднять массажный блок для ног» – нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить подъем.

Кнопка «Опустить массажный блок для ног» – нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить его движение.

Кнопка «Роликовый массаж стоп» – включает или выключает роликовый массаж стоп.

Кнопка «Нагрев» – включает или выключает функцию прогрева.

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.



ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые агрессивные моющие средства, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.
- Срок хранения массажного кресла неограничен.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Кресло не включается	Вилка шнура питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура питания в розетку. Проверьте все контакты.
	Не включен переключатель «Вкл/Выкл»	Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» (в положение «I»)
Массаж внезапно прекратился	Произошло отключение электропитания	Возобновите подачу электроэнергии
	Закончилось время программы массажа	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
Массажный механизм остановился в процессе массажа. Экран пульта управления несколько раз мигнул и выключился.	Произошел перегрев, превышена максимально допустимая нагрузка по весу и давлению на массажные ролики.	Устраните чрезмерное давление на ролики массажного механизма. Выключите питание, подождите 30 секунд и снова включите.
Массажное кресло сильно нагревается	Слишком долгая непрерывная работа кресла	Выключите питание и подождите 60 минут до следующего запуска
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук мотора, компрессора, механических частей кресла или звук трения массажного ролика о покрытие	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Отсутствует звук из динамиков	Уровень громкости звука установлен на минимальном значении	Увеличьте уровень громкости звука в мобильном телефоне или планшете
Массажные ролики не поднимаются до шеи и плеч	Сканирование тела для определения позиции плеч было выполнено неправильно	Полностью откиньтесь назад, глубоко расположитесь в кресле, повторите сканирование тела
Левые и правые массажные ролики массажного механизма расположены на разной высоте	Это нормальная работа массажного механизма, т.к. он запрограммирован на массаж с чередованием разных участков тела в течение определенных интервалов времени.	
Массажные ролики остаются теплыми после выключения функции прогрева	Для рассеивания остаточного тепла требуется некоторое время. Ролики могут оставаться теплыми из-за трения во время массажа.	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Массажный блок для ног или спинка кресла не поднимается или не опускается	Имеются помехи и препятствия при складывании или раскладывании кресла	Устраните препятствия и чрезмерное давление на спинку кресла или массажный блок для ног
	Массажный блок для ног или спинка кресла перегружены	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: Массажное кресло
 Модель: Spase

Напряжение: AC220-240V/50Hz
 Мощность: 250W

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Vodo» дилером в течение 5-ти лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____
Наименование товара: _____
Компания-продавец: _____
Адрес продавца: _____
Телефон продавца: _____
ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

Торговая марка: Bodo

Наименование: Массажное кресло

Модель: Space

Электропитание: 220-240В~ 50Гц, 250Вт

Изготовитель: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co., Ltd.,
No.168, Qianpu Road, Siming Zone, Xiamen, P.R. China

Импортер: ООО «Делфи», Россия, Санкт-Петербург, Кузнецовская, 10,
Лит А, Пом.13Н, Рабочее место 1

Тел.: +7 (812) 244-11-91; e-mail: delficild@gmail.com

Дата изготовления: 11.2025

Срок службы: 10 лет

Гарантийный срок: 5 лет

Условия хранения: в крытых помещениях при температуре
не ниже +5°С и относительной влажности воздуха от 45 до 75%

Разработано: Bodo, Германия

Страна происхождения: Китай

Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза N EAЭС N RU Д-СН.РА02.В.58266/22 от 21.03.2022г

bodo

