


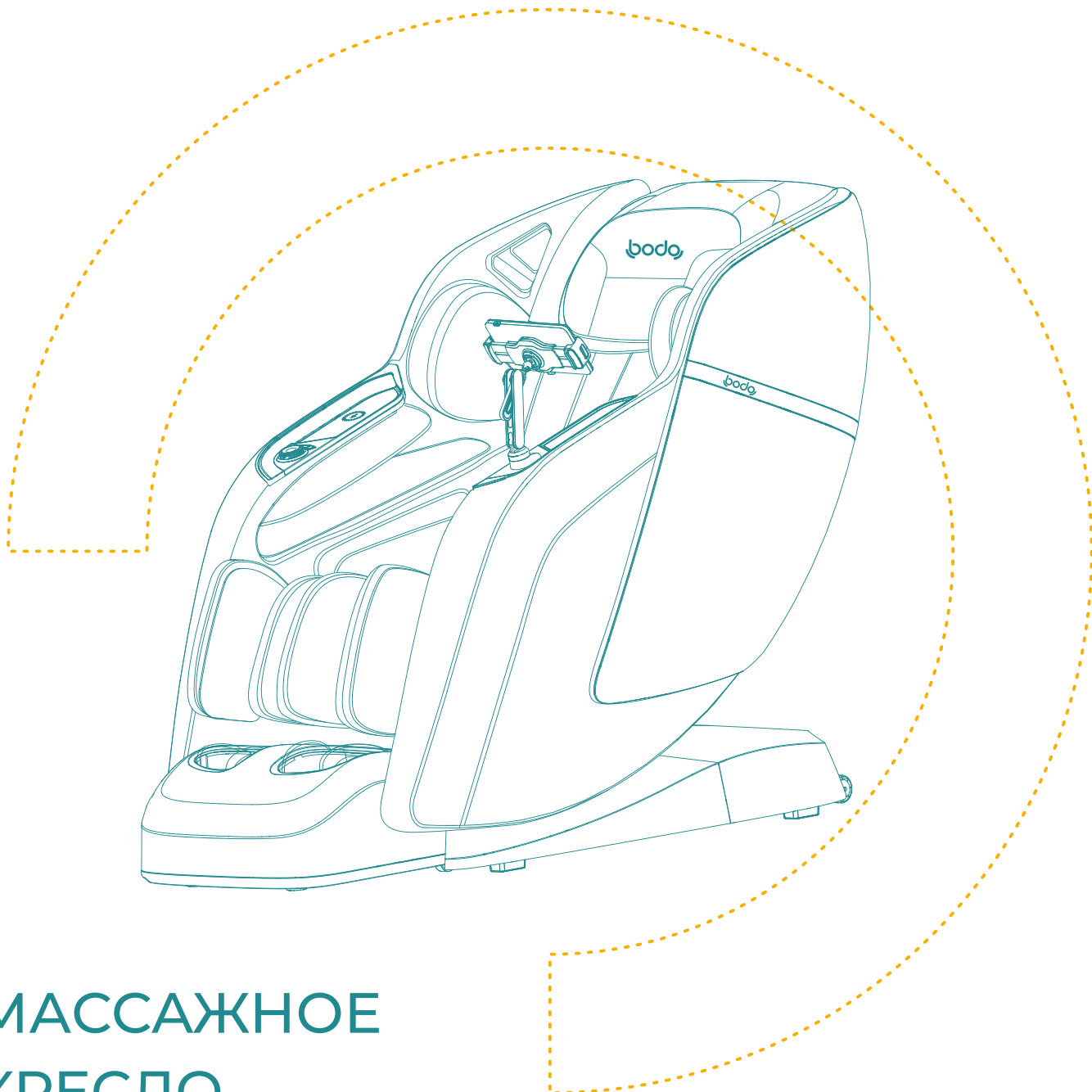

МАССАЖНОЕ
КРЕСЛО

NIMBUS

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Nimbus**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	9
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА	9
ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	10
СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА	11
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	13
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	15
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	15
УХОД И ХРАНЕНИЕ	19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
СПЕЦИФИКАЦИЯ	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	22

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки и эксплуатации массажного кресла.



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
 - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
 - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
 - ✓ страдаете ожирением, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным кровяным давлением
 - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
 - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
 - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
 - ✓ при онкологии
 - ✓ при эпилепсии
 - ✓ при парестезии
 - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
 - ✓ при тендовагините и остеопорозе
 - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструации
 - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
 - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
 - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
 - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Использование массажного кресла людям преклонного возраста, лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем лица, ответственного за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Убедитесь в исправности электрической сети и розетки, что их мощность достаточна для работы массажного кресла. Неправильный выбор электропитания может привести к нагреву электрического кабеля, розетки или даже к возгоранию. Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а также класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Создавать препятствия и блокировать движения массажных механизмов и массажного блока для ног.
- Перемещать работающее кресло. Вставать на кресло во время массажа.
- Включать и использовать массажное кресло, только что принесенное с холода в теплое помещение. Подождите не менее 1 часа, чтобы кресло прогрелось до температуры теплого помещения.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать аэрозоли и спреи рядом с работающим массажным креслом.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.
- Производить замену предохранителя не выключив электропитание и не отсоединив вилку питания от розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности

- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 140 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла — 20 минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5 минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Не используйте массажное кресло более 30 минут подряд. После сеанса массажа выключите кресло и дайте ему остыть в течение 30 минут перед повторным использованием.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания рук и ног, прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между пластиковыми деталями и механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Слушайте музыку через динамики Bluetooth на уровне, не превышающем 60% от максимальной громкости устройства, и не более 60 минут подряд.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией нагрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.

Меры предосторожности при использовании беспроводного зарядного устройства

- Неправильное расположение мобильного телефона в беспроводном зарядном устройстве может привести к медленной зарядке или ее отсутствию.
- Наличие чехлов из плотных материалов на мобильном телефоне может помешать нормальной зарядке, рекомендуется снять чехол.
- Беспроводная зарядка недоступна при подключении мобильного телефона к кабелю зарядки во время беспроводной зарядки.
- Не помещайте кредитные карты, проездной билет, карту дверного замка в беспроводное зарядное устройство. Любые устройства, использующие магнитные поля, могут потерять данные из-за магнитного поля беспроводного зарядного устройства и массажного кресла.
- Не кладите в беспроводное зарядное устройство металлические предметы во время зарядки, включая монеты, ключи или украшения, это может привести к деформации устройства или к неисправности.
- Контакт металлических предметов с зарядным устройством может привести к возгоранию.
- Прекратите использование беспроводного зарядного устройства, если мобильный телефон сильно греется.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
- Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.
- Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА



Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами!

Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона.

За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.


ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло — это механическое устройство бытового назначения для использования дома или в офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа. Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движения различными способами и осуществляющие контакт с телом человека путем массирования участков тела.

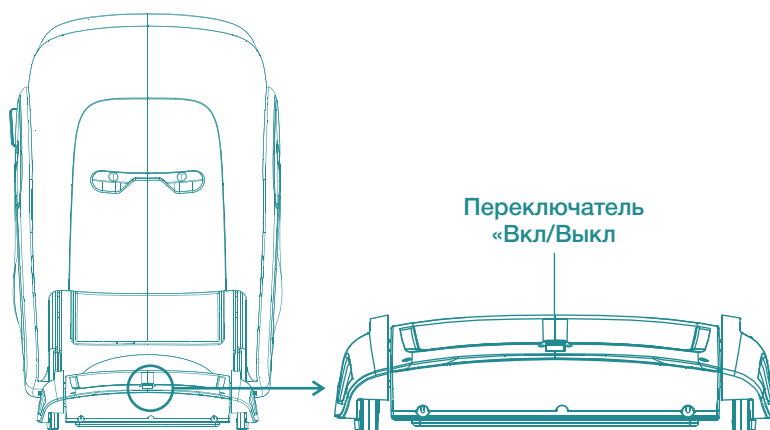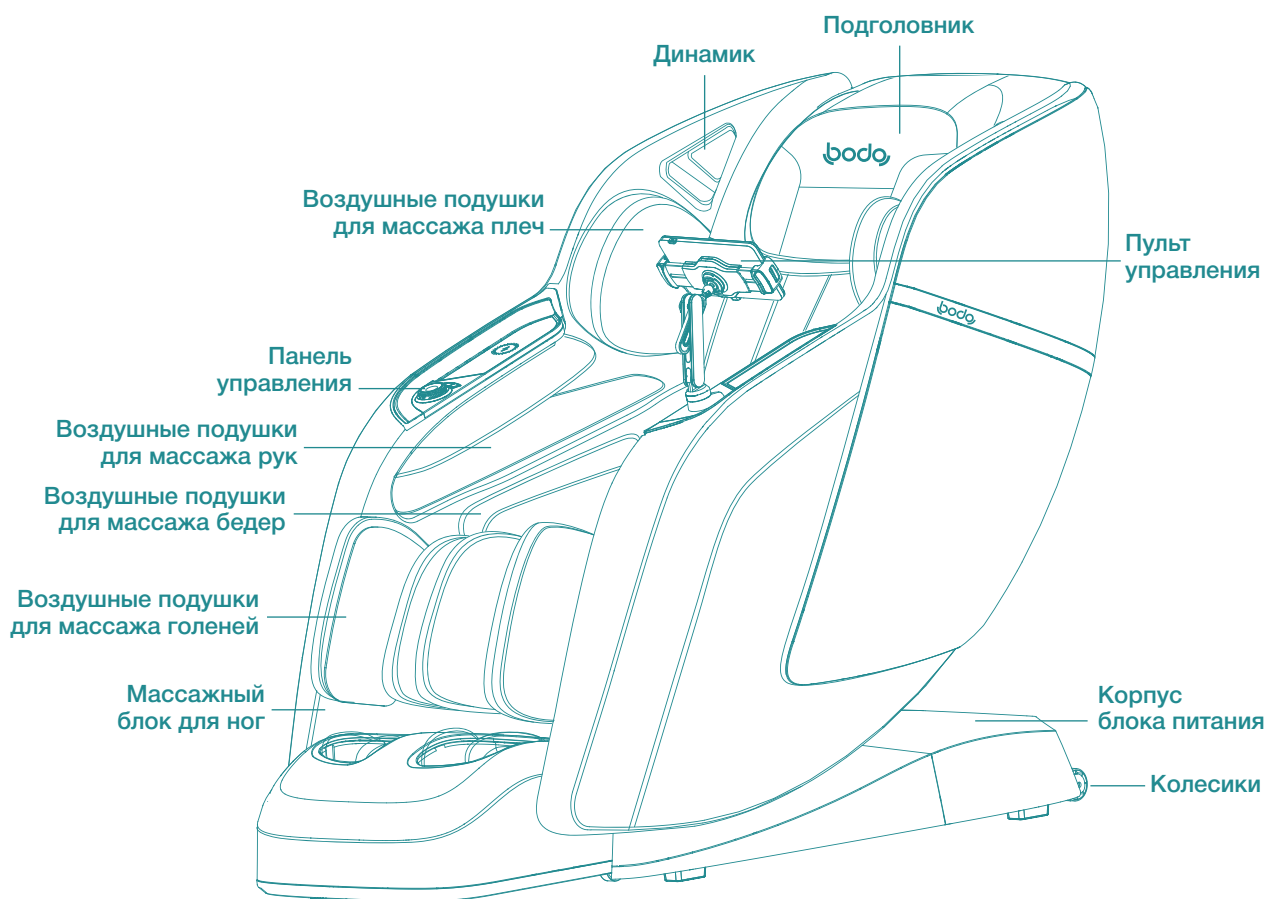


Шаг 1

С помощью двух и более человек аккуратно достаньте массажное кресло из коробки, удерживая его за основание спереди и за спинку сзади, поставьте на ровную поверхность. Делайте это медленно и осторожно во избежание повреждений. Достаньте остальные комплектующие из коробок. Кресло комплектуется набором для сборки. Проверьте комплектность.

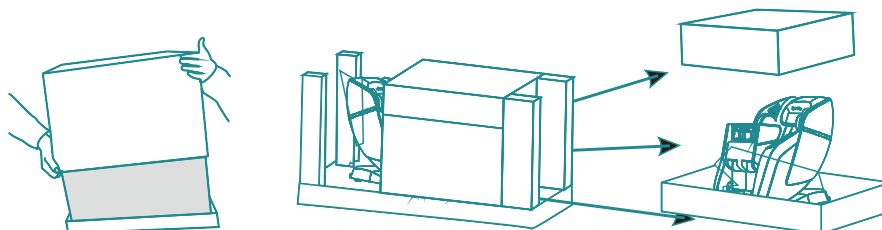


Шаг 2

Опустите массажный блок для ног.

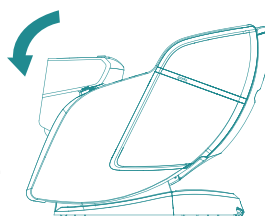


Шаг 3

Установите держатель пульта управления в специальное гнездо левого подлокотника. Поместите пульт управления в держатель и отрегулируйте его угол наклона. Вставьте штекер шнура пульта управления в соответствующий разъем на внутренней стороне подлокотника. Обратите внимание на выпуклый и вогнутый рельефы обоих разъемов – это своеобразный ключ для правильного подключения, чтобы соединительные контакты в разъемах совпадали. Затяните фиксирующую гайку в соединении.

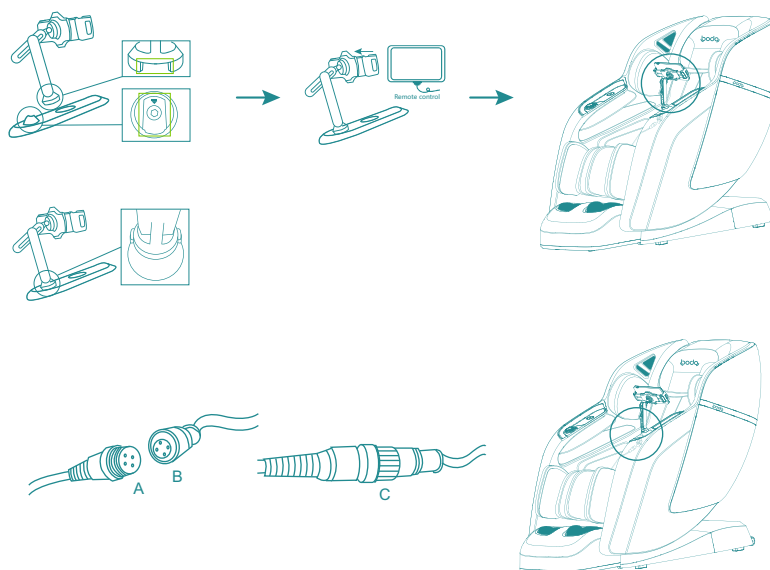


Шаг 4

Подушки спинки и сиденья кресла соединяются со спинкой кресла молнией. Поместите подголовник на подушку спинки и соедините их с помощью молнии и застежки. Также, соедините подушку сиденья с манжетой массажного блока для ног молнией.

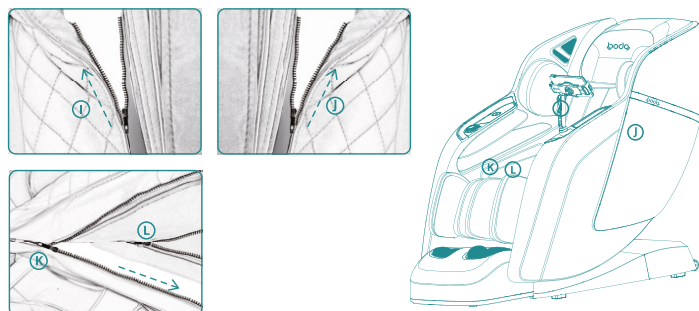

Шаг 5

Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания сзади кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» сзади блока питания (нажмите на «I», чтобы включить).

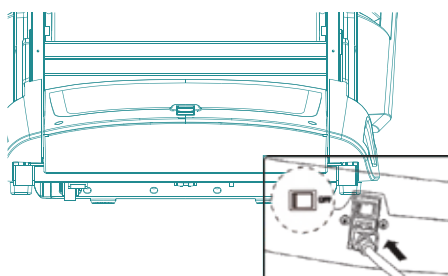


Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для перемещения.

Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провод питания на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо его сначала наклонить и поставить на колесики при помощи двух и более человек.


Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите кресло с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

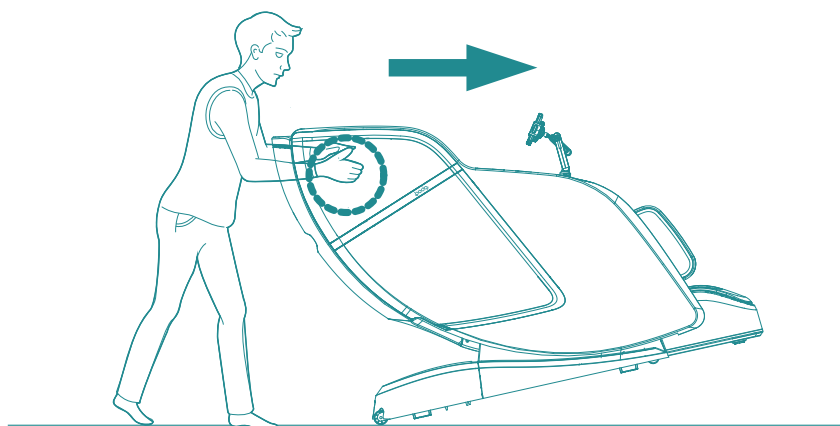

ВНИМАНИЕ

- Не прилагайте чрезмерное усилие при наклоне, т.к. это может привести к опрокидыванию и повреждению кресла.
- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением кресла к электросети.

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 15 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 30 см впереди кресла). Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

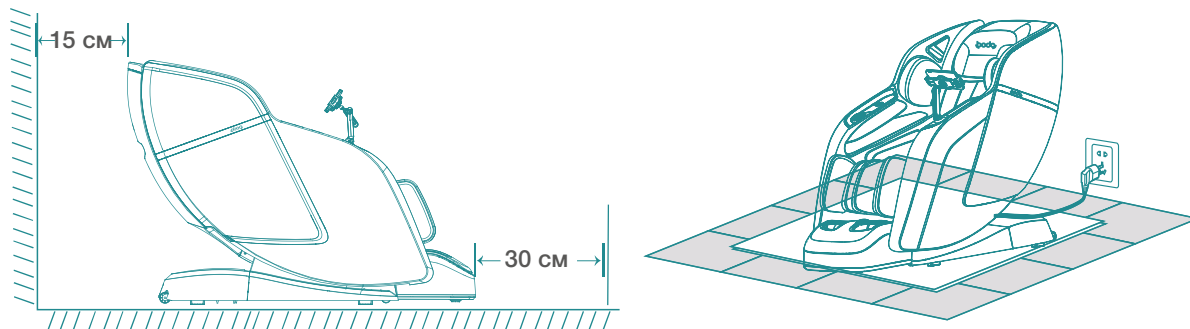

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.

Тщательно проверьте массажное кресло на предмет отсутствия повреждений, разрывов тканей подушки спинки, подголовника, сиденья и пр. При наличии разрывов или других повреждений, какими бы незначительными они не казались, немедленно прекратите использование массажного кресла и обратитесь в сервисную службу.

Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, выберите необходимую программу массажа и ее длительность.




ВНИМАНИЕ

- Не устанавливайте кресло спинкой к окну и другим стеклянным поверхностям.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения

После использования выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.

Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.

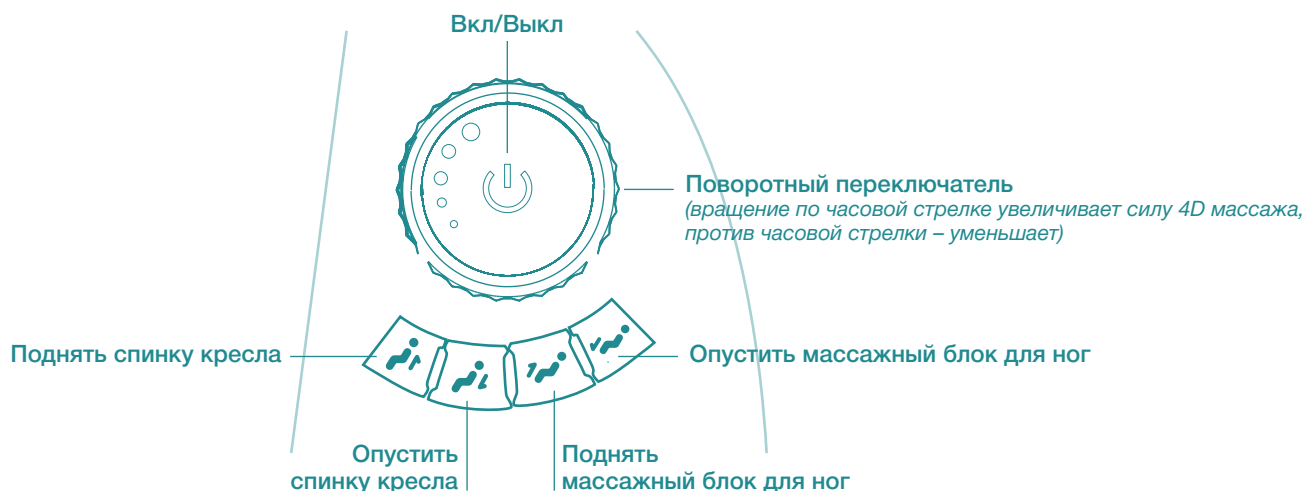

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Включите массажное кресло и пульт управления. Выберите программу массажа. После выбора программы кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, отрегулируйте их позицию вручную. После регулировки начнется сеанс массажа.




Завершить массаж

Чтобы завершить массаж, нажмите кнопку питания «Вкл/Выкл» на пульте управления. Массаж прекратится, массажные ролики, спинка кресла и массажный блок для ног вернутся в исходное положение.




АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Массажное кресло предлагает 24 автоматические программы массажа, разделенные на три категории: ОБЩИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ и ТОЧЕЧНЫЕ. Широкий выбор режимов позволяет подобрать оптимальный вариант для любой потребности в релаксации.

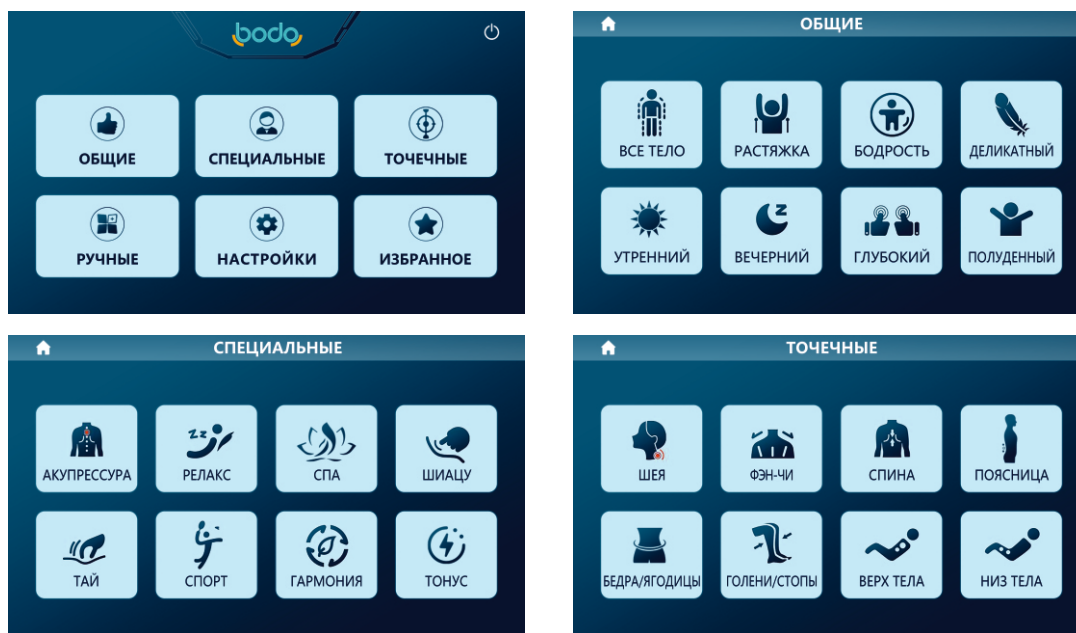

Экран запущенной программы массажа и ее настроек

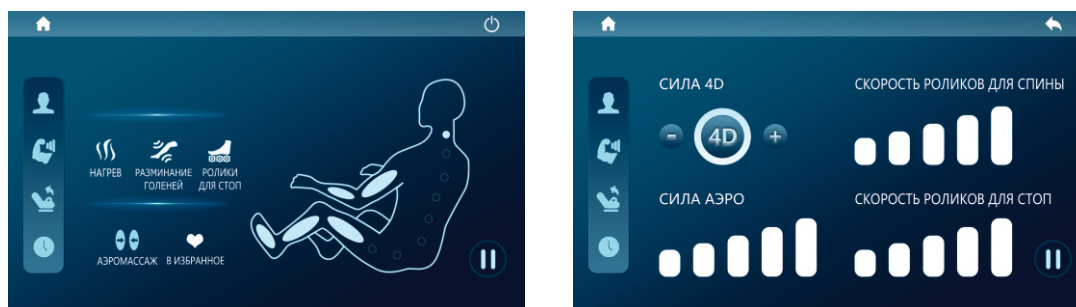


Экран настроек
позиции массажного кресла



Экран настроек
времени сеанса массажа



Экран настроек массажного кресла,
активации/деактивации голосового управления
и список голосовых команд

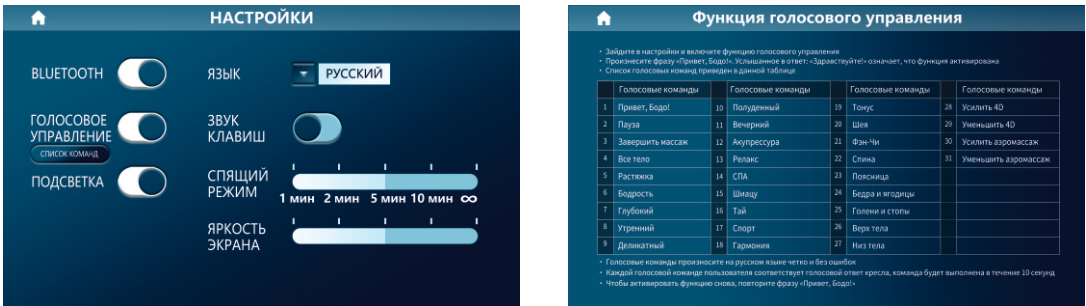


Примечание: экраны могут отличаться, в зависимости от запущенной программы

ПРОГРАММЫ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА

Включают в себя: РАЗМИНАНИЕ, ПОСТУКИВАНИЕ, ШИАЦУ, ПОХЛОПЫВАНИЕ, РАЗМИНАНИЕ С ПОСТУКИВАНИЕМ и МИКС.


Экран выбора и настроек программ массажа ручного режима

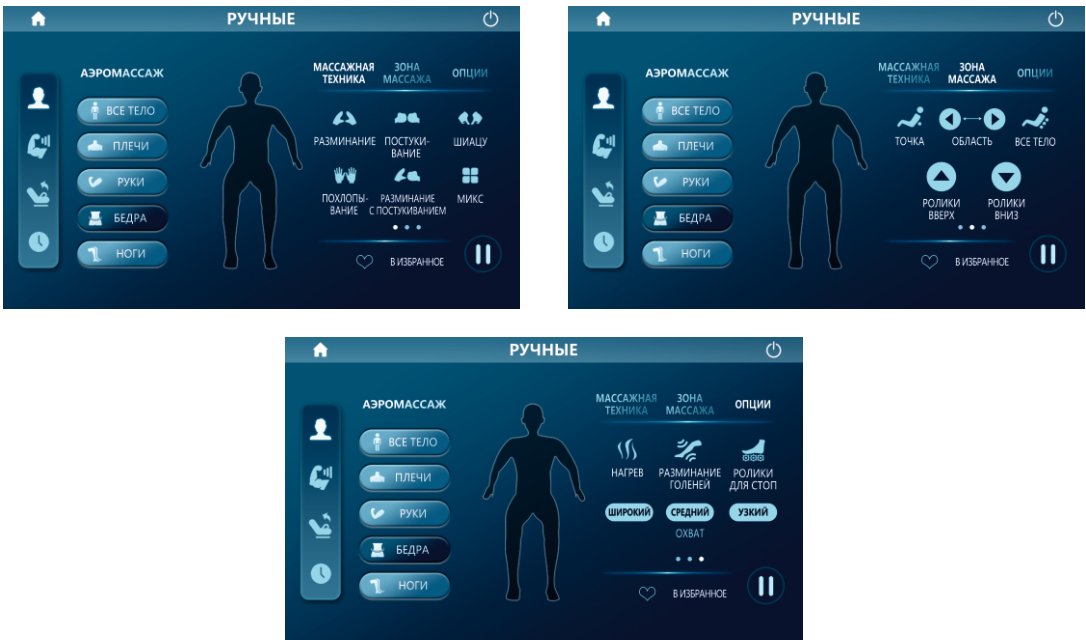

ИЗБРАННОЕ

Чтобы добавить программу в избранное, нажмите на экране с текущей программой на иконку сердечка с надписью «В ИЗБРАННОЕ».

Вы можете сохранить в этот раздел до 5-ти программ. Избранные программы будут сохранены в памяти даже при отключенном электропитании массажного кресла.

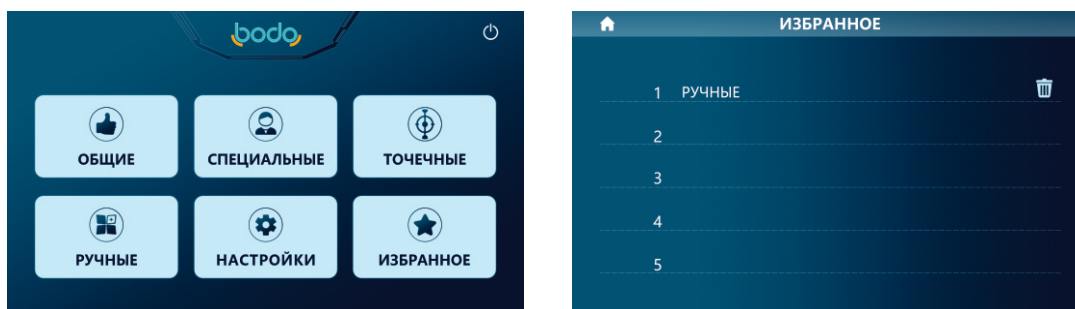

На главном экране нажмите «ИЗБРАННОЕ» и войдите в список избранных программ, выберите и запустите сохраненную программу.

Чтобы удалить программу из избранного, в списке избранных программ нажмите на иконку корзины справа от названия программы.

АУДИОСИСТЕМА

Рядом с подголовниками расположены динамики. Благодаря сопряжению кресла с вашим музыкальным плеером (*смартфоном или планшетом*) по технологии Bluetooth, вы можете наслаждаться музыкой или другими расслабляющими звуками и мелодиями, сидя в кресле. Успешное Bluetooth сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции Bluetooth в этих устройствах и под управлением операционной системы Android или iOS. После сканирования доступных Bluetooth устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом. После успешного сопряжения вы сможете слушать музыку во время массажа через динамики кресла.

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.



ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Использовать фен, утюг и другие нагревательные приборы для сушки обивки кресла запрещено!

Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.
- Срок хранения — не ограничен.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь, что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук мотора, компрессора, электромагнитных клапанов, механических частей кресла или звук трения массажного ролика о покрытие	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Кресло не включается	Неисправность электрической сети	Проверьте и устраните неисправность в вашей электросети
	Вилка шнура питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку шнура питания в розетку, проверьте все контакты
	Не включен переключатель «Вкл/Выкл»	Нажмите на переключатель «Вкл/Выкл» (в положение «I»)
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на аналогичный по параметрам
Массаж внезапно прекратился	Произошло отключение электропитания	Возобновите подачу электроэнергии
	Закончилось время программы массажа	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
	Слишком долгая непрерывная работа кресла - сработала защита от перегрева	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
Отсутствует звук из динамиков	Уровень громкости установлен на минимальном значении	Увеличьте уровень громкости звука
	Отсутствует Bluetooth сопряжение с вашим устройством воспроизведения музыки	Установите сопряжение Bluetooth с устройством
Массажный блок для ног или спинка кресла не поднимается или не опускается	Имеются помехи и препятствия при складывании или раскладывании кресла	Устраните препятствия и чрезмерное давление на спинку кресла или массажный блок для ног
	Массажный блок для ног или спинка кресла перегружены	
Штекер и шнур питания нагреваются	Слишком долгая работа кресла	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
	Сторонний фактор	Прекратите использование кресла и обратитесь в сервисную службу компании продавца

Наименование продукта: массажное кресло

Название модели: Nimbus

Напряжение: AC220-240V/50-60Hz

Мощность: 150W

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла дилером в течение 5-ти лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____
Наименование товара: _____
Компания-продавец: _____
Адрес продавца: _____
Телефон продавца: _____
ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

Торговая марка: Bodo
Наименование: массажное кресло
Модель: Nimbus

Электропитание: 220-240В~ 50-60Гц, 150Вт

Изготовитель: Ningbo Zhouqi Health Technology Co., Ltd.,
No.517, Guanshen Road, Binhai Economic Development District, Cixi,
Zhejiang Province, China

Импортер: ООО «Делфи», Россия, Санкт-Петербург, Кузнецовская, 10,
Лит А, Пом.13Н, Рабочее место 1

Тел.: +7 (812) 244-11-91; e-mail: delficild@gmail.com

Дата изготовления: 04.2026

Срок службы: 10 лет

Гарантийный срок: 5 лет

Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C
и относительной влажности воздуха от 45 до 75%

Разработано: Bodo, Германия

Страна происхождения: Китай

